


# ALMA cintura

www.AlmaCojines.com

## Instrucciones:


Lea y siga las instrucciones detalladamente para un mejor uso de su cojín Alma.

## Terapia de calor y de frío...

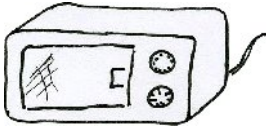


Microondas

Coloque el cojín en un plato limpio, junto con medio vaso de agua, en el interior del microondas (650w a 850w) durante un tiempo máximo de 3 minutos para obtener resultados óptimos.

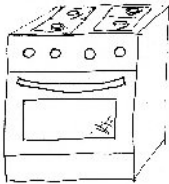

Horno convencional

○ Quite la funda exterior, coloque el cojín en un plato limpio apto para hornos e introdúzcalo en el nivel medio de un horno convencional. Caliéntelo a 110°C durante un tiempo máximo de 10 minutos para un efecto óptimo. Transcurrido la mitad del tiempo indicado, dé la vuelta al cojín. No sitúe el cojín en la parte inferior del horno para evitar daños sobre el mismo.

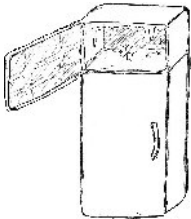

Congelador

○ Para su uso en frío introduzca el cojín en una bolsa de plástico y colóquelo en el congelador. Transcurrida una hora, podrá utilizar el cojín Alma para aliviar tensiones musculares y otros dolores, etc...

La funda del cojín se puede lavar a máquina (30°C). Se recomienda la supervisión de un adulto cuando el cojín sea utilizado por un niño. El relleno del cojín está formado de semillas de grano naturales, por lo que no debe usarse en casos de alergia a esta sustancia. Guardar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa.

Esperamos que disfrute de los efectos relajantes de Alma. Por favor, en cualquier caso tenga en cuenta las instrucciones descritas arriba ya que un uso inapropiado podría provocar daños en el cojín, electrodomésticos o incluso en el propio usuario, que en ningún caso serían responsabilidad del fabricante del producto.